



## Einstellen des Trachtenbandes am Theo Boot®

Angepasst an die Hufform und Huflänge muss das Trachtenband in die Seitenschlitze der Schuhoberschale eingeführt werden.

**Beispiel: Kurzer Huf** – Einführung in den 1. Schlitz von außen, zum 2. Schlitz wieder ausführen und in den 3. Schlitz wieder einführen. Auf der gegenüberliegenden Hufschuhseite ist gleichermaßen zu verfahren. Das Trachtenband wird dann wieder an der Schuhoberschale, unterhalb des Stoppers, befestigt.

**Beispiel: Langer Huf** - Einführung in den 1. Schlitz von außen, zum 3. Schlitz wieder ausführen. Auf der gegenüberliegenden Hufschuhseite ist gleichermaßen zu verfahren. Das Trachtenband wird dann wieder an der Schuhoberschale, unterhalb des Stoppers, befestigt.

*Bei weiteren Fragen dürfen Sie uns gerne anrufen: Tel. (06406) 4758*  
**Ihr Team vom Hufschuhdoktor Theo Rüspler**

